

Super Porcelain **EX-3**

Céramique pour restaurations dentaires

Noritake Super Porcelain EX-3
Pour un résultat aussi vrai que nature



IMITEZ LA NATURE

UN CHEF D'ŒUVRE TECHNOLOGIQUE QUI REFLÈTE LE NATUREL DE LA DENTITION À TRAVERS VOS MAINS.


Noritake Super Porcelain EX-3, un système de céramique de haute qualité, a été développé grâce aux connaissances approfondies et à la technologie céramique de Kuraray Noritake Dental.

PRÉCISION DE LA DENTITION NATURELLE

Le concept de teinte de Kuraray Noritake Dental instaure une harmonie intra-buccale en diminuant la couleur verdâtre et en ajoutant une teinte rosée.

LA FLUORESCENCE CONFÈRE UN ASPECT NATUREL

Noritake Super Porcelain EX-3 affiche un bleu pâle fluorescent propre qui donne l'apparence d'une dent naturelle.

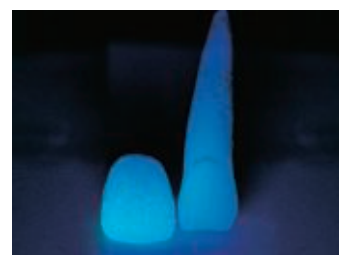

Noritake Super Porcelain EX-3 / Dent naturelle sous lumière UV

DONNÉES CLINIQUES

Analyse de survie des couronnes postérieures céramo-métallique (avec Noritake Super Porcelain EX-3)

Groupe	Couronnes totales	Survie moyenne (jours)	Probabilité de survie (%)
CCM	1080	2694 (5)	99,3

CCM = couronne céramo-métallique

Fusun Ozer, DMD, PhD autres, «Une enquête rétrospective sur la survie à long terme des couronnes postérieures en zircone et en céramo-métalliques en pratique privée», Quintessence Int 2014; 45: 31-28

Système d'adaptation: Lava, 3M ESPE; Procera, Nobel Biocare; KATANA™, Kuraray Noritake Dental Fabriqué par un laboratoire dentaire (Cusp, Boston)

CAS 1

Restauration en céramique stratifiée sur métal



Préparation de la dent



Vue post-opératoire

Fabrication par Naoki Hayashi, RDT

CAS 2

Facette stratifiée en céramique



Vue pré-opératoire



Vue post-opératoire

Fabrication par Nondas Vlachopoulos, RDT

CAS 3

Couronne incisive céramo-métallique stratifiée en Noritake Super Porcelain EX-3



Vue pré-opératoire




1 CCM. 3 stratifiés sur réfractaire



Vue post-opératoire

Fabrication par Daniele Rondoni, RDT


Tableau chromatique de Noritake Super Porcelain EX-3

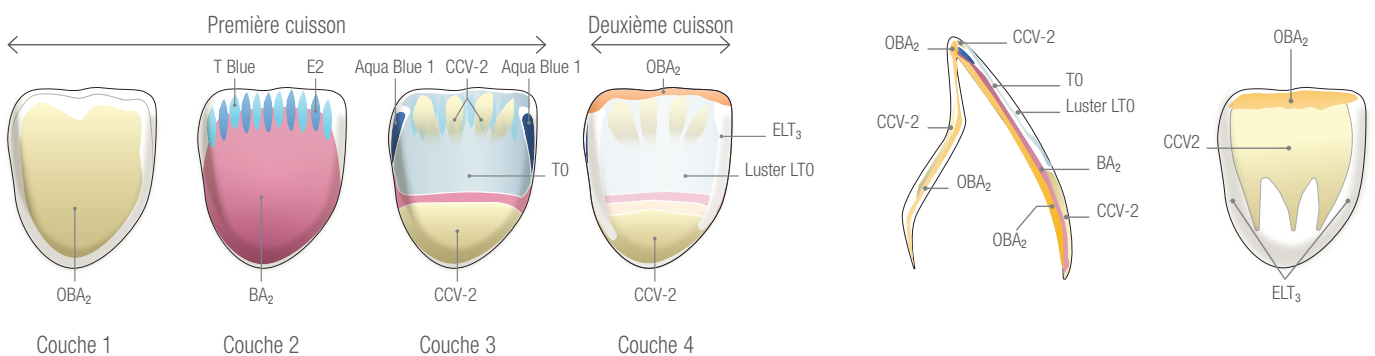

Par Daniele Rondoni, RDT

TABLEAU DE COMBINAISON DES COULEURS

PASTE OPAQUE 6g / 2.4ml

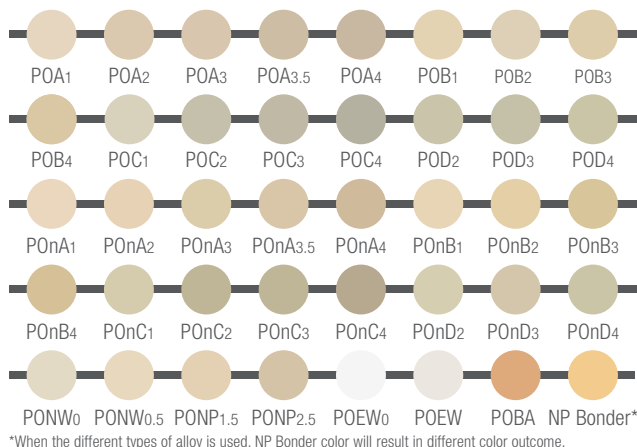


*When the different types of alloy is used, NP Bonder color will result in different color outcome.


PASTE OPAQUE MODIFIER 3g / 1.2ml




UNIVERSAL PASTE OPAQUE 6g

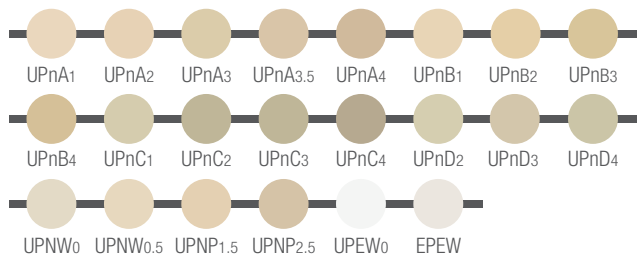


UNIVERSAL PASTE OPAQUE MODIFIER 3g

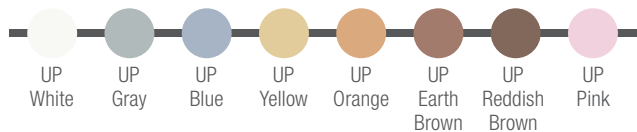


POWDER OPAQUE 10g / 50g / 200g

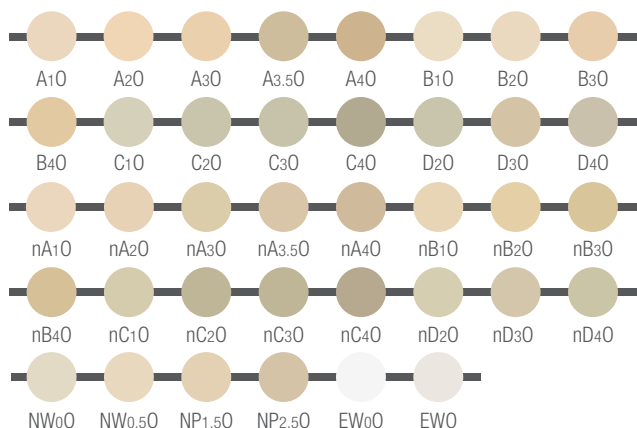


POWDER OPAQUE MODIFIER 10g / 50g

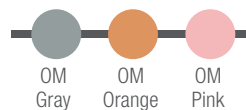

MARGIN 10g / 50g

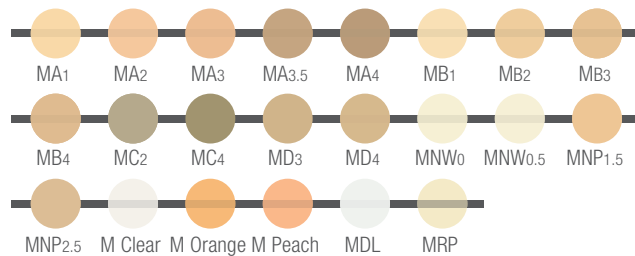

OPACIOUS BODY 10g / 50g 200g

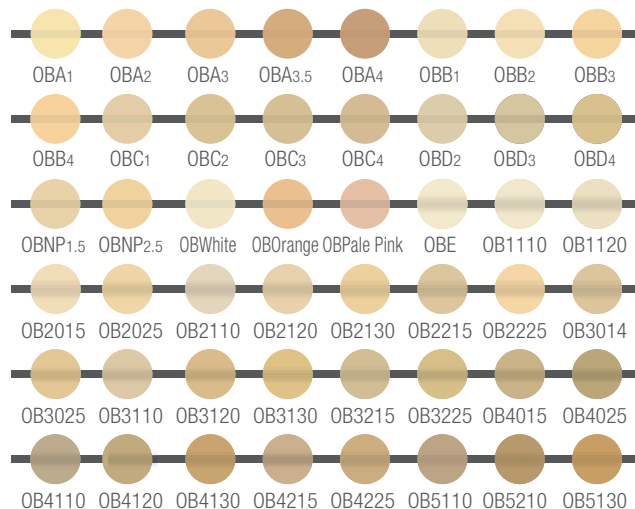

CERVICAL 10g / 50g / 200g



AUTRES GAMMES DE PRODUITS EX-3

Universal Paste Opaque : Même couleur que Paste Opaque et Paste Opaque Modifier

Value Shade : Les Value Shades sont des teintes supplémentaires qui étendent la sélection existante EX-3 de poudre de porcelaine Body et Opacious Body pour inclure la teinte VITA* 30-Master*.


Speed Enamel (S1, S2, S3, S4) : Spécialement conçue pour la technique de construction en deux couches

n color Shade : n Color Shade est formulée en vue de l'obtention de variantes plus colorées de Body et Paste Opaque (Universal Paste Opaque, Powder Opaque). Grâce à l'intensification de la couleur, elle peut même être utilisée dans les cas où l'espace est insuffisant pour la construction de la porcelaine.


*VITA et 30-Master sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

TABLEAU DE COMBINAISON DES COULEURS


BODY 10g / 50g / 200g

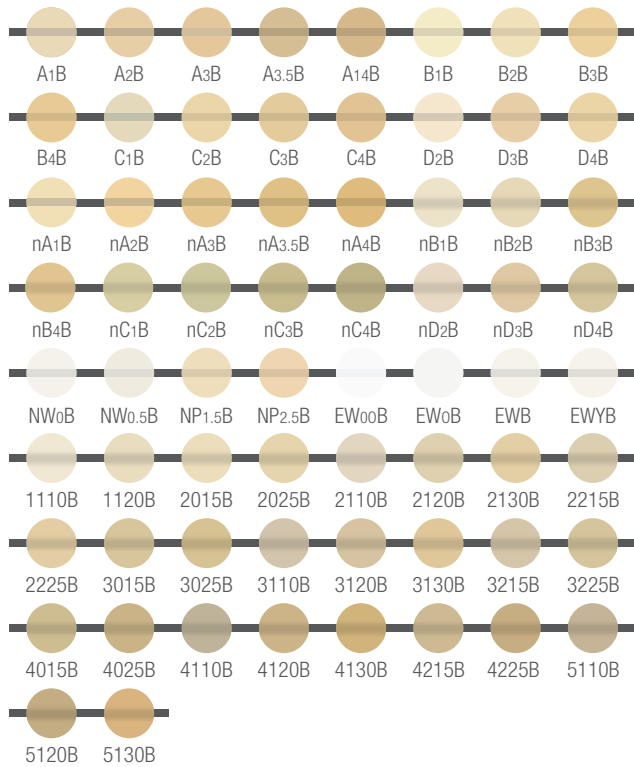


ENAMEL 10g / 50g / 200g

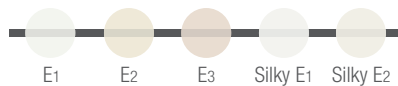


SPEED ENAMEL 10g / 50g / 200g

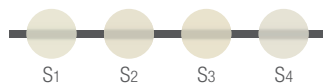


TRANSLUCENT 10g / 50g / 200g

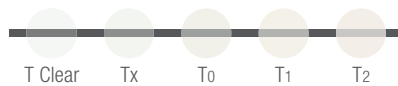

LUSTER 10g / 50g / 200g

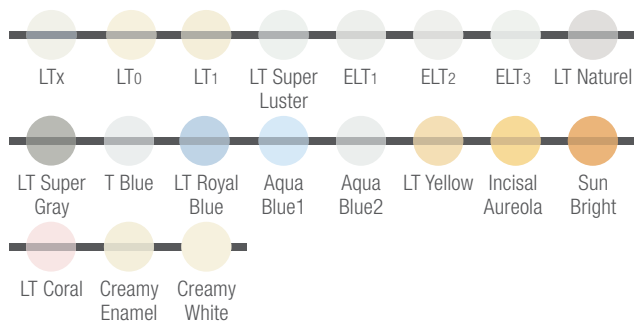

CLEAR CERVICAL 10g / 50g / 200g

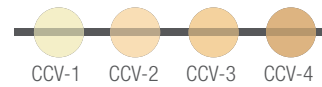


MAMELON 10g / 50g



TISSUE 10g / 50g



MODIFIER 10g / 50g

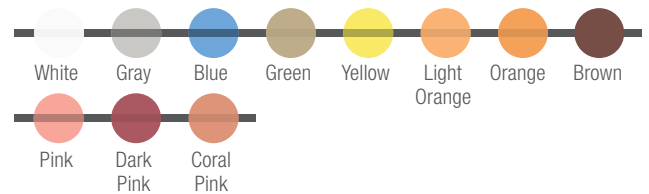

ADD-ON 10g / 50g




INTERNAL STAIN 3g



EXTERNAL STAIN 3g (Glaze 10g / 30g)



ADDMATE 10g

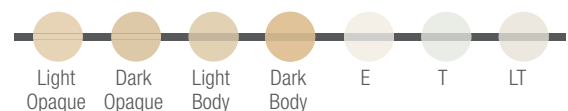

Vos interlocuteurs :

Jérémie Flipaux (autres régions)

06 84 34 68 87 ; jeremie.flipaux@kuraray.com

Christophe Commaux (région Sud Est)

06 80 59 25 53 ; christophe.commaux@kuraray.com

Delphine Bibard (région Sud Ouest)

06 31 39 99 26 ; delphine.bibard@kuraray.com

Emmanuel Bourdageau (région Nord)

07 88 69 35 17 ; emmanuel.bourdageau@kuraray.com

Aurélie Dubrul (région Nord Ouest)

06 76 07 60 09 ; aurelie.dubrul@kuraray.com

Dominique Terracol (région Rhône-Alpes Auvergne)

07 88 39 16 98 ; dominique.terracol@kuraray.com

Cristele Da Costa (région Ile de France)

06 83 95 66 11 ; cristele.dacosta@kuraray.com

Suivez nous :



/KurarayNoritakeFrance



/KurarayNoritakeFrance

VOTRE CONTACT

Kuraray France

Immeuble Le Centralis

63 Avenue du Général Leclerc

92340 Boug La Reine

Tél. : +33 56 45 12 53

Email : centralmarketing@kuraray.com

Site internet www.kuraraynoritake.eu/fr

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez à lire les consignes d'utilisation qui l'accompagnent.
- Les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Les coloris réels peut différer légèrement des coloris de la présente brochure.

« CERABIEN » et « KATANA » sont des marques déposées de NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

